



Centro Giovanile card. Schuster - Milano

Linee guida per il prelievo del defibrillatore e suo utilizzo

Con riferimento alla piantina del Centro individuare la postazione DAE più consona alla propria area operativa.

In caso si dovesse ravvisare la necessità di utilizzare il defibrillatore recarsi con passo lesto alla postazione individuata e:

- a) **Strappare** il cordino bianco (1) che avvolge la cassetta di contenimento.
(Nota: non appena si spezza il cordino un cicalino interno inizia a suonare e vengono avvisati i responsabili del Centro.)
- b) **Ruotare** le due maniglie di chiusura (2) in senso anti orario di 90°.
- c) **Aprire** la porta frontale della cassetta.
- e) **Sfilare** il detector (4), abbandonarlo nella cassetta collegato al suo cavo.
- f) **Prelevare** il defibrillatore e con passo lesto recarsi sul posto dell'evento.




Fare uso del defibrillatore in accordo alle istruzioni ricevute durante il training di formazione.

Ad intervento completato riporre il defibrillatore nella cassetta senza curarsi di ripristinare quanto rimosso precedentemente e chiudere la cassetta ruotando in senso orario le maniglie (2). Oppure consegnarlo in segreteria

Preparare un breve rapporto di quanto avvenuto per informare il 118 e consegnarlo in segreteria.



A.S.D. Centro Schuster

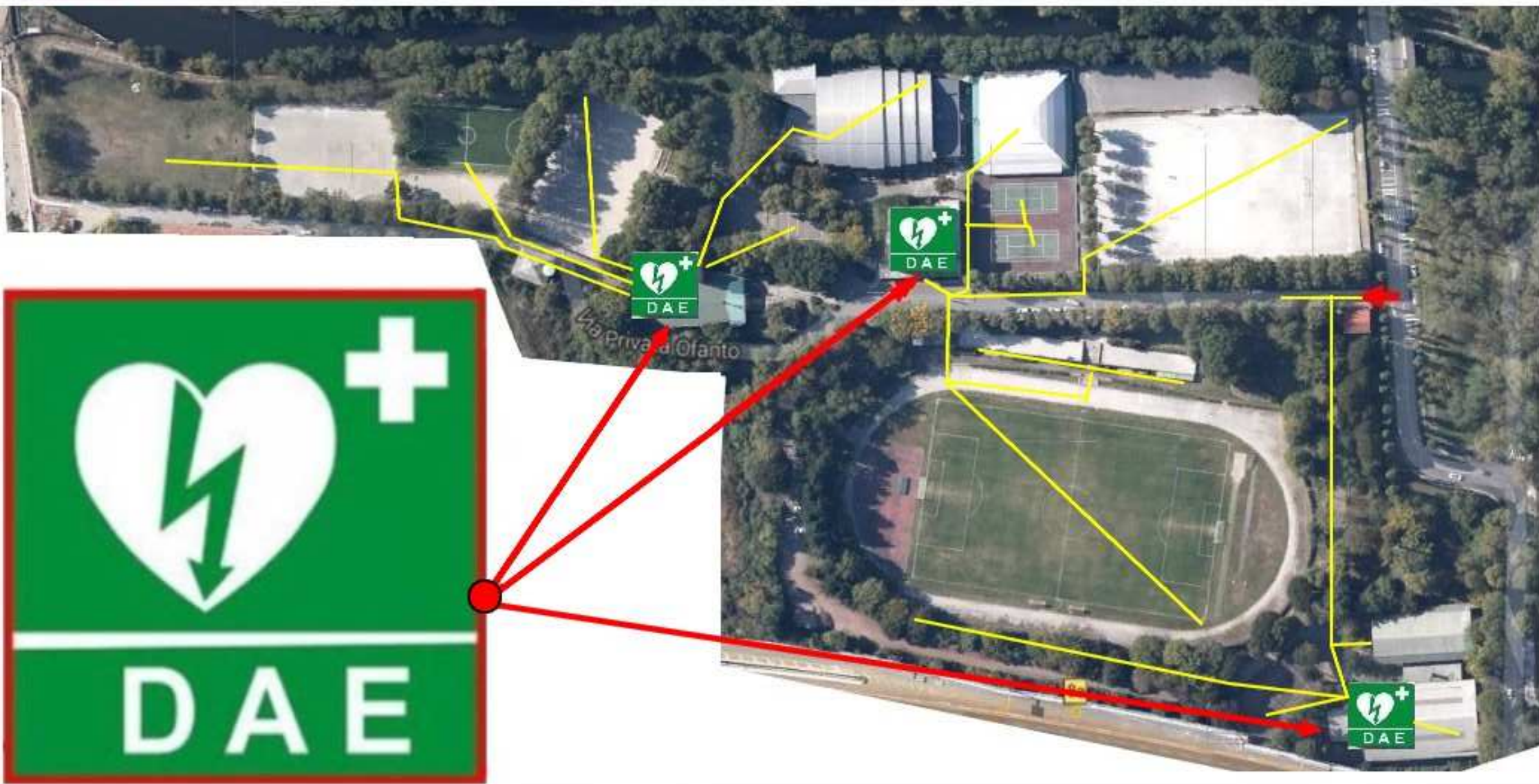

Via padre Lodovico Morell 2 (già via Feltre 100)